

《救助担架フレスト保守点検》

◆点検時期・期間

点検日 _____ 年 月 日

毎年2回、定期的に実施してください

◆保管方法・場所

- 直射日光の当たらない場所で保管
- 高温多湿の場所を避けて保管
- 収納袋に入れて保管
- すぐ使用できる状態で保管（取扱説明書の折りたたみ方参照）
- 購入日を明示してください（ _____ 年 月 日 ）

◆定期点検場所・部位


- 担架本体の破れ、カビ等損傷の確認（表・裏）
- ショルダーベルト(黄)と本体接合部の損傷の確認（赤丸部4カ所裏面）
- 各ベルトの損傷、劣化状況の確認（黄・青・緑）
- 担架布の劣化状況の確認
- 各ベルトの劣化状況の確認
- アタッチメント(黒色金具)の接続状況（差込時、カチット音の確認）

◆使用前点検

- 担架全体の劣化・損傷状況の目視点検
- アタッチメント(黒色金具)接合部の点検（カチット音がすることを確認）
- ショルダーベルト(黄)を最長で使用する場合、ベルト端部を接続具より3cm程度残して使用（抜け防止）

◆手入方法

- 本体表面防水コート仕上げの為、水拭き陰干し
- 折りたたみ状態から広げ、しわを伸ばす

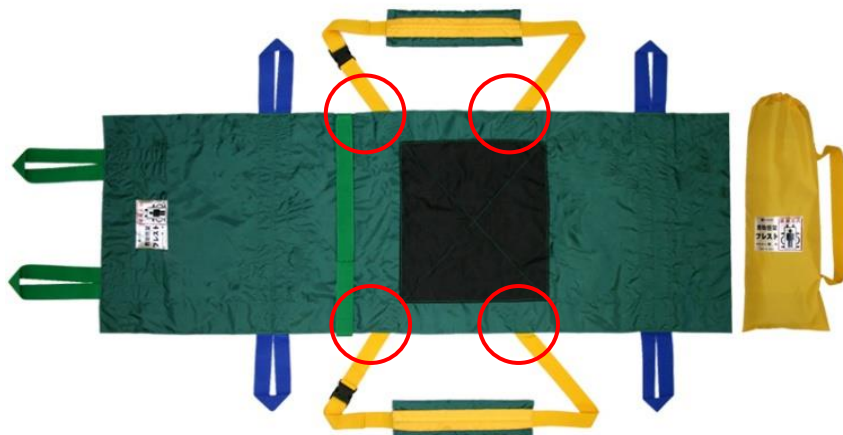

※コピーしてご使用ください